

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a fontos biztonsági figyelmeztetésekkel és a használatra vonatkozó részletes utasításokkal. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi használatra.

A készülék eladása esetén ne felejtse az útmutatót átadni az új tulajdosnknak a készülékkel és a tartozékokkal együtt.

## **Fontos biztonsági óvintézkedések**

### **FONTOS!!!**

Az alkoholszonda használata közvetlenül vagy 15 percig a szeszes ital fogyasztása után a szonda meghibásodását vagy a további mérések pontatlanságát okozhatja. Ezzel elveszíti a készülékre vonatkozó jótálási jogát helytelen kezelés miatt.

- A tesztelést ne végezze erős szélben vagy zárt helyiségben, amelyek túl van fűtve vagy ahol alkoholos kigőzölgések lehetnek.
- Ha a kijelzőn megjelenik a lemerült elemek jel, cserélje ki újakra.
- A fűvókába ne fűjjon füstöt, ételt vagy folyadékot.
- A készüléket csak +10 - +40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja. Eltérő környezet a meghibásodását vagy pontatlan méréseket okozhat.
- Az alkoholszint a lélegzetben sok tényezőtől függ és az idővel változik. A szint már néhány perccel az eredeti mérés után más lehet.
- A készülék mérési eredményei nem használhatóak bíróság eljárásban mint bizonyíték.
- Ezek készülék adatai csupán tájékoztató jellegűek. Nem javasoljuk annak eldöntésére használni, hogy valaki képes-e felelős tevékenység végzésére. Néhány tényező (pl. természetes gázmaradékok, füst és kellemetlen lehelet) befolyásolhatja a mért értékeket.
- Ne engedje magának, se másnak, hogy alkohol fogyasztása után járművet vezessen. Mindig biztosítson pótszofőrt vagy használjon más közlekedési eszközt, ha alkoholt fogyasztott.
- Se az eladó, se a gyártó nem felelős a készülék használatából adódó károkért.

### **SOHA SE IGYON ALKOHOLT, HA GÉPJÁRMŰVET KÉSZÜL VEZETNI!!!**

**Figyelem:** A készülék egy év használata után javasolt ellenőrizni a mérés pontosságát. Gyakori használat során a készülék élettartama kimerülhet és a mérés eredményei pontatlanok lehetnek.

# A készülék leírása



## Az elemek behelyezése

1. Vegye le az elemtér fedelelet.
2. Tegyen be 2 AAA típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint.
3. Tegye a fedelet vissza a helyére.
4. Az elemek behelyezése után önműködően elindul az öntisztítás. Az öntisztítás jelző villogni kezd és a kijelzőn visszaszámol az idő.
5. Az öntisztítás funkció befejezése után használható a készülék.

## Megjegyzés:


Vegye ki az elemet, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.

Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kitenni, mint pl. napfény, tűz stb. A helytelenül használt elemekből elektrolit szivároghat és korróziót okozhatnak. A távirányító helyes működése érdekében, az alábbi utasítások szerint járjon el:

- Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
- Az elemeket ne töltsé, ne melegítse, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Ne hagyjon lemerült elemet a távirányítóban.
- Ne használjon különböző típusú vagy öreg és új elemeket együtt.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
- Ha a készülék nem működik jól vagy csökkent a hatékonysága, cserélje ki az elemeket újakra.
- Ha elektrolit-szivárgás következik be, adja le tisztítás végett a készüléket szakszervizben.

# Használat

1. Használat előtt öblítse ki a száját tiszta vízzel. Legalább 5 percig használat előtt ne dohányozzon és ne igyon szeszes italt.
2. A bementi nyílásba az LCD kijelző fölé tegyen szívószálat vagy fűvókát.
3. Nyomja meg röviden a START gombot a készülék bekapcsolásához. A túlmelegedés érzékelő kb. 18 másodpercre aktiválódik. A kijelzőn egyet villan a „PH” és azután a kijelzőn megjelenik a „Wait” (Várjon) és elkezd visszaszámolni.

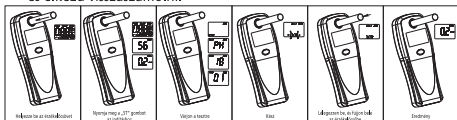

## Fontos

Mivel az érzékelőnek fel kell melegednie, várja meg, míg a felmelegedés végbemegy.

Amint befejeződik a visszaszámlálás, a kijelzőn a „READY” jelenik meg és egyidejűleg hangjelzés hallatszik, ami azt jelzi, hogy a készülék üzemkész. Egyidejűleg a kijelzőn villogni kezd a „BLOW” kontrollfény, ami a felhasználó arra figyelmezteti, hogy a fűvókába kell fújni.

4. Nyomja meg és tartsa a START gombot és kivilágítódik a „BLOW” kontrollfény és hosszú hangjelzést hall. Egyidejűleg bele kell fújni a fűvókába. A fűvókába fújásnak folyamatosnak kell lennie és körülbelül 6 másodpercig kell tartania.
  - Amint rövid hangjelzést hall, hagyja abba a fújást. A kijelzőn megjelenik a vonatkozó adat.
    - i. Ha a mért érték kisebb mint 0.1 ‰ BAC, a „0,0” (alacsony érték) jelenik meg.
    - ii. A 0.1 ‰ – 4 ‰ BAC között mért érték megjelenik a kijelzőn.
    - iii. Ha a mért érték nagyobb mint 4 ‰ BAC, a kijelzőn a „HI” (magas érték) és a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) jelenik meg.
5. Röviden nyomja meg a START gombot a következő teszt elindításához. Amint leáll a visszaszámlálás és a „READY” kontrollfény jelenik meg a kijelzőn hangjelzéssel, újra használhatja a készüléket.
6. Nyomja meg a START gombot kb. 2 másodpercre a készülék kikapcsolásához. Ha nem nyom meg gombot 2 percig, a készülék önműködően kikapcsol.

# Kijelzések

|                 |  |
|-----------------|--|
| Alacsony érték  | Ha a mért érték kisebb mint 0.1 ‰ BAC, a kijelzőn a „0,0” (alacsony érték) jelenik meg ZÖLD kivilágítással.  |
| Riasztási érték | <p>A mért érték a riasztási koncentrált értékkel azonos vagy magasabb. Hangjelzés hallatszik és egyidejűleg villog a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) kb. 15 másodpercig.</p> <p>A kijelző kivilágítása váltogatja a színét – ZÖLD ÉS PIROS. Megjelenik a mért érték és a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) üzenet kivilágítva marad a kijelzőn.</p> <p>Ha a mért érték nagyobb mint 4 ‰, a kijelzőn villog a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) és a „HI” (magas érték). Nyomja meg a MODE gombot a hangjelzés kikapcsolásához.</p> <p><b>TILOS VEZETNI</b>, ha túl van lépve az alacsony riasztási érték.</p> |

## Fontos figyelmeztetés

- Hogy biztosítsa a pontos mérést a készüléken, el kell végezni az ún. öntisztítást, ha a készüléket több mint 2 hétig nem használta (különösen első használat előtt). Az öntisztítás művelet az elemek kivételével és újra behelyezésükkel és a készülék bekapcsolásával indítja el. Az „INICIALIZÁLÁS” jelző villogni kezd. Az öntisztítás művelet körülbelül 5 percig tart és ezalatt a kijelző visszaszámolja az időt. Az öntisztítás utolsó percében hangjelzés hallatszik. A készülék önműködően kikapcsol 1 perc múlva és az öntisztítás művelet befejeződik. A teszt elvégzése előtt győződjön meg, hogy nem maradt afúvóka résben alkohol-maradék.
- Ha lenyomja a START gombot kb. 2 másodpercre, az öntisztítást befejezheti és kapcsolja ki a készüléket. Vagy nyomja meg röviden a START gombot a mérés megkezdéséhez és az öntisztítás funkció kihagyásához.
- Pontos eredmény érdekében a készülék használata előtt győződjön meg, hogy a készülékben nem maradt alkohol-maradék. A készüléket ellenőrizheti, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „LO” (alacsony érték). Ezt a START gomb egy lenyomásával érheti el. Nyomja meg és tartsa a START gombot és néhány másodperc múlva fújjon a fúvókába. Esetleg megrázhatja a készüléket előre-hátra néhányszor, ami szintén segíthet eltávolítani az alkohol-maradékot a készülékből.
- 4 elvégzett teszt után a készüléket hagyja nyugalomban kb. 2 percig.
- Ha a kijelzőn az „Er” villog kb. 5 másodpercig, az helytelen kezelést jelenthet:
  - Mérés közben nem nyomta meg és tartotta a START gombot.
  - Nyomja meg bármelyik gombot a hangos hibajelzés befejezéséhez.
- Ha a készüléket nem használja, száraz helyen tárolja.
- Ha villogni kezd az alacsony elemtöltöttség jelző, a mérés nem pontos és az elemeket azonnal ki kell cserélni.
- Ha 2 egymást követő mérés között a különbség nagyobb mint 0.1 %, a mérést meg kell ismételni.

# Műszaki adatok

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Méréstartomány                 | 0,1 - 4 ‰   |
| Elem                           | 2 x 1,5V AAA alkáli elem                          |
| Kijelző                        | Digitális LCD kijelző kétszínű háttérvilágítással |
| Egység                         | ‰ (vagy ‰BAC vagy mg/l; választható)              |
| Automatikus kikapcsolás        | 2 perc  |
| Teszt hossza                   | ≥ 6 másodperc                                     |
| Teszt előkészítés ideje        | 25 másodperc                                      |
| Méretek (mély. x szél. x mag.) | 98 x 36 x 16 mm                                   |
| Súly                           | kb. 27 g (elemek nélkül)                          |
| Kalibrálás riasztási érték     | 0,2 ‰   |
| Tartozékok                     | 3 fúvóka  |

A fentebbi adatok az okok megadása nélkül változhatnak.

**Ne felejtse,** hogy a mérési értéket sok tényező befolyásolhatja mint pl. a levegő szennyezettség gáz, füst vagy rossz szájíz miatt. A mérési értéket tekintse tájékoztató jellegűnek.

Se a gyártó, se az eladó nem vállal felelősséget a készülék használatából következően.

**Vigyázat!** Az alkoholszonda használata közvetlenül vagy 15 percig a szeszes ital fogyasztása után a szonda meghibásodását vagy a további mérések pontatlanságát okozhatja. Ezzel elveszíti a készülékre vonatkozó jótállási jogát helytelen kezelés miatt.



## A használt elemek megsemmisítése

A használt elemeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Kövesse az érvényes helyi előírásokat.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

### Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.